


Checkliste AED Kontrolle

Vorbereitung im FW Lokal	1	Einsatzjacke anziehen
	2	Papier und Reinigungsmittel mitnehmen
Vor Ort beim AED 	3	Informieren: - Gemeinde: Während den Öffnungszeiten kurz bei der Kanzlei anmelden - Personen die vor Ort sind <i>„Ich bin XY vom Samariterverein und kontrolliere den AED auf die Einsatzbereitschaft. Die Sirene wird kurz zwei Mal ertönen. Kein Grund zur Sorge.“</i>
	4	Kontrolle von aussen: - Unversehrtheit - Funktion LED - LED blinken weiss Nachbeleuchtung bei Dunkelheit - LED blinken rot Heizung war/ist in Betrieb bei Kälte - Heizung bei Kälte unten am Wandkasten testen (handwarm)
	5	AED Kontrolle: - Wandkasten öffnen - AED entnehmen und wieder schliessen - AED aus Tasche nehmen - Runde Statusanzeige oben rechts Gerät grün - AED öffnen und Kontrolle ob Anweisungen erfolgen - Anzeige der Batteriespannung - Unversehrtheit und Ablaufdatum Elektroden - AED schliessen - Infoblatt nach dem Einsatz vorhanden - AED mit Infoblatt in Tasche versorgen - AED Fronttasche kontrollieren - Unversehrtheit und Ablaufdatum Ersatzelektroden - Medizinalrasierer vorhanden - Microfasertuch vorhanden - Beatmungsmaske vorhanden - 2 Paar Nitrilhandschuhe vorhanden - Kleiderschere vorhanden - AED wieder versorgen ganz hinten an die Wand stellen (Heizung)
	6	Reinigung des AED Wandkasten
	7	Während den Öffnungszeiten bei Gemeinde kurz abmelden Meldung alles i.O.
Abschluss im FW Lokal	8	Material deponieren
	9	Kontrollliste visieren